

**必ず測定前には
うがいをしましょう！**

特に

- ・飲食後に測定する場合
- ・喫煙後に測定する場合

※ 飲食後に含まれる成分で反応したり、ヤニが機器内部に付着すると、正常な測定がおこなえなくなります。

1 測定準備確認

メッセージ欄が「測定準備完了」、測定器本体画面が「ID」を確認する。
 測定器本体画面が「ID」以外の場合は、測定器本体のボタンをどれか押す。



**2 出庫/帰庫の選択
社員IDの入力**

マウスピースをセットしてから、【SONY】と書かれた黒いパッドに免許証を置き、測定器本体の【出庫】もしくは【帰庫】ボタンを押します。



免許証を置く

出庫もしくは帰庫を押す

3 測定開始

音声ガイドに従い、測定を行います。
 ※測定器本体から「ピピッ」というブザーの後、5秒間息を吹き続けてください。



**4 測定結果
次の測定**

測定結果は、測定後に表示されます。
 データは、自動で保存されます。
 5秒間のクリーニング後 **1** に戻ります。



5 エラー表示

- ・「Er00」ウォームアップエラー/通信エラー
- ・「Er01」測定開始後10秒以内に吹かなかった
- ・「Er02」測定中の吹きかけが弱い、短い
- ・「Er03」パスワードの入力が正しくない
- ・「Er04」Bluetooth通信異常
- ・「Er06」センサー使用回数が75,000回以上
- ・「Er09」システムエラー
- ・「Er11」システムエラー
- ・「Er12」システムエラー

測定中に上記のエラーが生じた場合は、再度、手順【1】から操作をお願い致します。